


PANNI PRONTI ALL'USO
PER LA DETERSIONE
E IL DEBRIDEMENT
SEMPLICE DELLA LESIONE
E DELLA CUTE PERILESIONALE.



DEBRIDEMENT
FACILE E
DELICATO
DELLA LESIONE

CLEANWND®

PANNO PER DETERSIONE E DEBRIDEMENT DELLE LESIONI

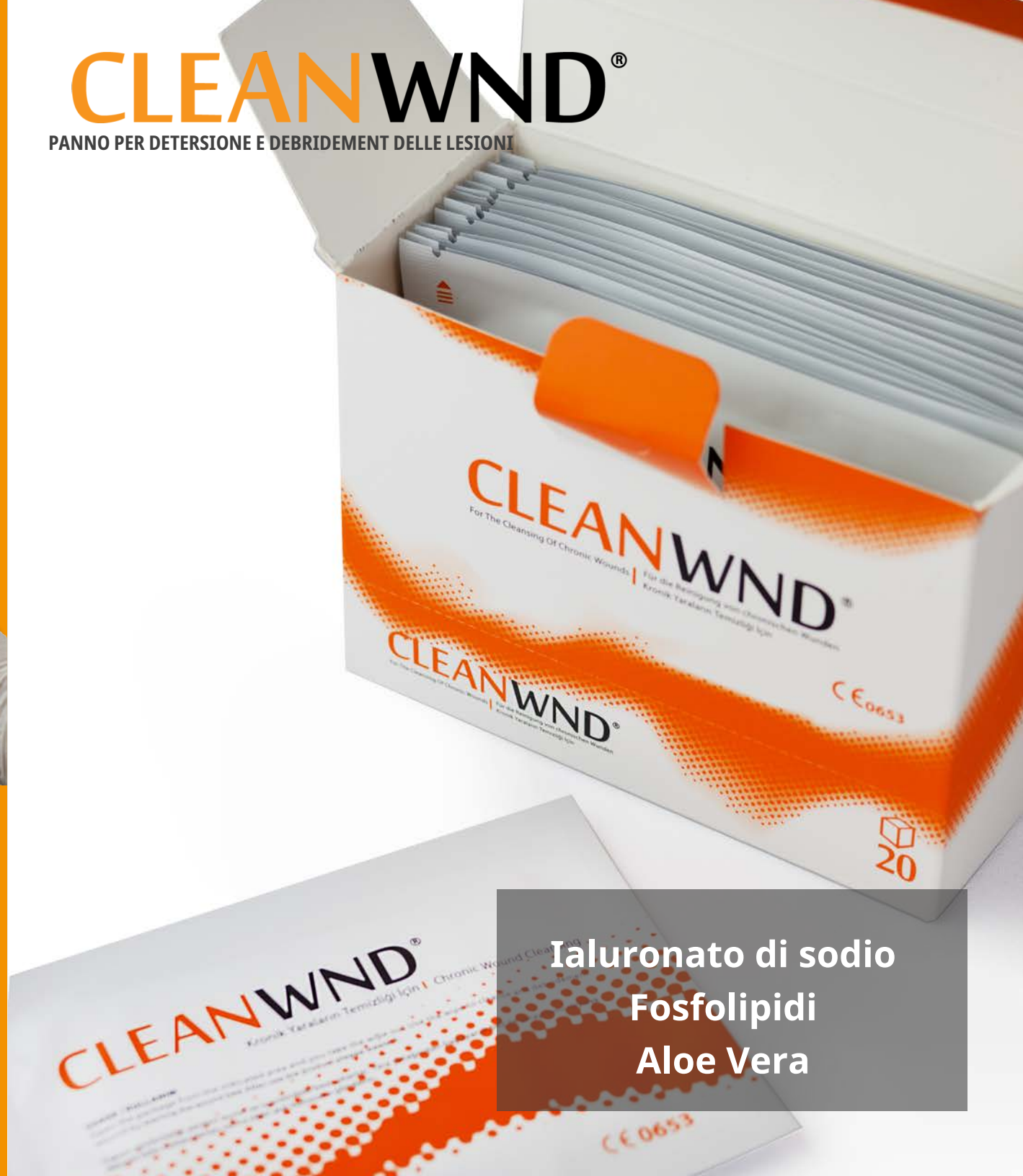

Taluronato di sodio
Fosfolipidi
Aloe Vera

CHE COS'È CLEANWND®?

CLEANWND® è un panno in tessuto non tessuto impregnato che agisce come innovativo sistema di debridement e trattamento delle lesioni. Rimuove accuratamente detriti ed essudato, in modo praticamente indolore, dalla lesione ed elimina squame e cheratosi dalla cute circostante.

CLEANWND® è prodotto con il metodo di agugliatura (needle punch) e contiene fibre corte, che raccolgono facilmente i detriti durante il debridement meccanico, senza lasciare residui di lanugine o fibre nel letto della lesione o sulla cute circostante.

INDICAZIONI

Lesioni croniche e acute

Ulcere del piede diabetico

Ulcere venose degli arti inferiori

Lesioni da pressione

Lesioni traumatiche



QUALI SONO I BENEFICI?

- I panni CLEANWND® sono già impregnati: non sono necessari liquidi aggiuntivi per detergere la lesione.
- Facile da usare.
- Rimuove detriti dalla lesione, squame e cheratosi dalla cute circostante.
- Efficace, rapido e semplice.
- Riduce costi e tempi.
- Elevata accettazione da parte dei pazienti; uso quasi indolore.



ULCERA DELL'ARTO INFERIORE



**RENDIAMO LA TUA
CASA UNA VERA
DIMORA CON I
NOSTRI ELEMENTI
DI STILE.**

COME FUNZIONA?


I panni CLEANWND® sono impregnati con ialuronato di sodio e fosfolipidi. L'ialuronato di sodio è un componente importante della matrice extracellulare della cute e svolge un ruolo significativo nel metabolismo del derma, nella guarigione della lesione e nella riparazione tissutale. I fosfolipidi favoriscono la detersione della cute e reintegrano i fosfolipidi persi nel tessuto danneggiato della lesione e nella cute circostante.

ISTRUZIONI PER L'USO

Aprire la confezione nel punto indicato ed estrarre il panno. Utilizzare il panno per detergere ed effettuare il debridement della lesione. Il panno CLEANWND® non ha un lato superiore o inferiore. Utilizzare un panno CLEANWND® per ogni lesione da sottoporre a debridement. Il panno CLEANWND® è già impregnato, quindi non sono necessari altri liquidi detergenti. Dopo l'uso, smaltire il panno come rifiuto sanitario.

Prima

Dopo

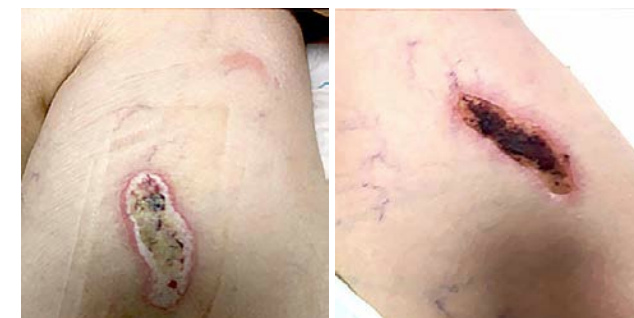

CERTIFICAZIONI

- **EN ISO 13485**

Sistemi di gestione della qualità

- **EN ISO 9001**

Sistemi di gestione della qualità

- **CAMERA BIANCA EN ISO 8**

- **93/42/CEE**

Dispositivo medico Classe IIa

- **CE 0653**

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Unità di vendita

1 scatola da 10 panni

1 scatola da 20 panni

Dimensioni

15 cm x 20 cm

Confezione

1 panno / busta

Validità

3 anni



TESSUTO NON TESSUTO AGUGLIATO

