


# VACUTEX™

La soluzione 3 in 1 per le ferite difficili da guarire

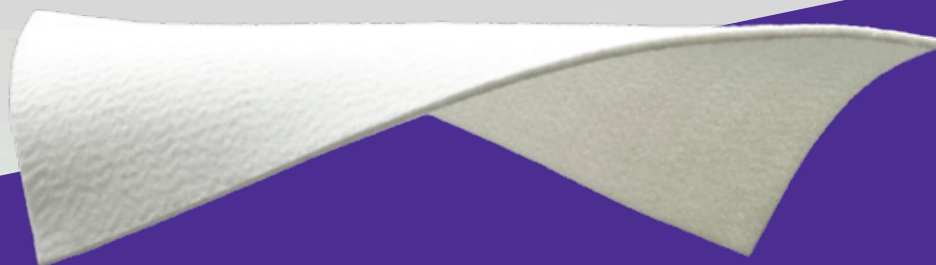

## Bendaggio per ferite Vacutex™

## Esempi di applicazione di Vacutex™

Vacutex™ può essere tagliato in qualsiasi forma e adattato alla maggior parte delle ferite specifiche, incluse ferite superficiali, profonde, con sottominatura, nonché per le fistole.


### Materiale necessario

- Vacutex™ della dimensione corretta
- Forbici
- Bendaggio in silicone (se necessario)
- Bendaggio assorbente
- Materiale di fissaggio

### Ferita con sottominatura dopo colostomia



Riempi la sottominatura con Vacutex™ tagliato su misura, assicurandoti che Vacutex™ tocchi il fondo della ferita.

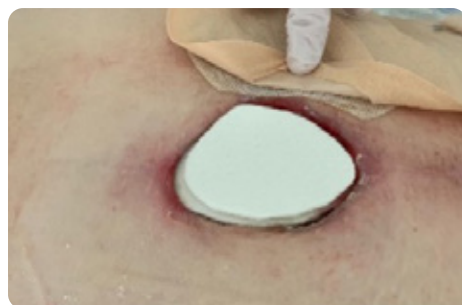

Quindi applica un Vacutex™ con un'ampia sovrapposizione.



Quindi applica un Vacutex™ con un'ampia sovrapposizione.



Infine, applica un bendaggio (super) assorbente e fissalo.

### Applicazione di Vacutex™ in combinazione con Multidex®



Applica il gel o la polvere Multidex® direttamente sul letto della ferita.



Applica un bendaggio in silicone se necessario.



Quindi applica un Vacutex™ con un'ampia sovrapposizione.



Infine, applica un bendaggio assorbente e fissalo.

### Fissa Vacutex™ con giunzioni a coda di rondine.



In combinazione con giunzioni a coda di rondine.

**Modi diversi di applicazione e fissaggio di Vacutex™, ad esempio per le ulcere da pressione.**



drenaggio (1-40 cm)



o



taglio "buccia di mela"



applicazione, ad esempio, di idrocolloide per proteggere i margini della ferita




bendaggio (super) assorbente



o in combinazione con drenaggio o sacca per stomia.

**In caso di contatto diretto con osso o tendine, applicare Vacutex™.**

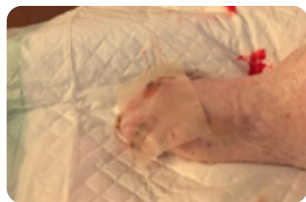

- In caso di contatto diretto con osso o tendine, applicare prima una medicazione in silicone.
- Successivamente, applicare Vacutex™.

- Se necessario, applicare bendaggi (super) assorbenti
- Successivamente, fissare

**Utilizzo di Vacutex™ sotto terapia compressiva**

- Tagliare Vacutex™ leggermente più piccolo del letto della ferita (2-3 mm).
- Riempire la ferita fino al livello della pelle.
- Per una ferita superficiale: tagliare Vacutex™ con un'ampia sovrapposizione in forma ovale e applicarlo (questo eviterà segni di pressione sulle estremità della medicazione sotto la terapia compressiva).
- Applicare una medicazione (super) assorbente sopra.
- Fissare se necessario.
- Applicare la terapia compressiva.

**Utilizzo di Vacutex™ in ferite con ipergranulazione**

- Se si sviluppa ipergranulazione, continuare il trattamento con Vacutex™! L'ipergranulazione scomparirà durante il trattamento.



01-06-2021




08-06-2021



15-06-2021

**Rimozione di Vacutex™**

- Inumidire Vacutex™ con soluzione fisiologica o soluzione per il lavaggio delle ferite, quindi rimuoverlo con cautela.

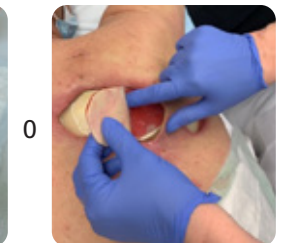

o

## Cos'è VACUTEX™

La medicazione per ferite Vacutex™ crea un effetto di vuoto grazie alla funzione capillare. Non è identica alla NDT, ma possiede un meccanismo autologo simile alla NDT. È composta da una struttura a 3 strati di filamenti di poliestere e poliestere-cotone. Vacutex™ non è una medicazione in schiuma, né una medicazione (super) assorbente o un'idrofibra. Dal punto di vista clinico, Vacutex™ è la prima medicazione per ferite in grado di influenzare in modo significativo i livelli di ossigeno, essudato ed edema all'interno e intorno alla ferita.

## Principio di funzionamento



1 Aspirazione continua

2 Drenaggio

3 Drenaggio e rimozione

## Indicazioni

Ulcere del piede diabetico, ulcere da pressione, ulcere venose degli arti inferiori, fistole, ustioni, ferite chirurgiche. Vacutex™ può essere utilizzato perfettamente in combinazione con un idrogel.

## Controindicazioni

Vacutex™ non deve essere utilizzato:

- In caso di sanguinamento arterioso
- In pazienti allergici al poliestere
- In combinazione con medicazioni a base di vaselina, poiché bloccano l'azione capillare della medicazione
- In caso di malignità nella ferita
- In presenza di osteomielite non trattata
- In fistole non enterali e fistole non esplorate
- In tessuto necrotico con formazione di croste
- Su vasi sanguigni o organi esposti
- Con cautela nei pazienti in terapia anticoagulante o con difficoltà di emostasi della ferita wound haemostasis

## Manuale d'uso breve di Vacutex™

- Tagliare la medicazione Vacutex™ 2-3 mm più piccola dei margini della ferita. (In questo modo i margini della ferita possono chiudersi durante il trattamento)
- Per ferite profonde, applicare il numero necessario di strati fino al livello della pelle, in modo che la ferita sia completamente riempita.
- Applicare Vacutex™ in eventuali cavità presenti fino al fondo della ferita.
- In caso di contatto diretto con osso o tendine, applicare prima una medicazione in silicone, quindi posizionare sopra la medicazione Vacutex™.
- Coprire la ferita e la pelle intatta circostante con uno strato aggiuntivo di Vacutex™.
- Se è presente un'elevata quantità di essudato, applicare sopra una medicazione super assorbente. Quando questa è satura, lasciare Vacutex™ in sede e sostituire solo la medicazione assorbente.
- In caso di ipergranulazione, non interrompere l'uso di Vacutex™, ma continuare il trattamento: l'ipergranulazione scomparirà progressivamente.
- Vacutex™ può essere utilizzato sotto terapia compressiva (ad es. per ulcere venose degli arti inferiori); utilizzare uno strato non aderente come strato di contatto primario, poiché le bende compressive possono rimanere in sede fino a una settimana (3, 5 o persino 7 giorni). Per una ferita profonda sotto compressione, sovrapporre gli strati di Vacutex™ fino al livello della pelle e coprire con una medicazione assorbente. Per una ferita superficiale, se si decide di applicare Vacutex™ oltre i margini della ferita, assicurarsi che la medicazione copra abbondantemente la ferita e venga tagliata in forma ovale, per evitare la formazione di segni di pressione dalle estremità della medicazione sotto la terapia compressiva.
- Frequenza del cambio medicazione: 2-3 volte a settimana

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UNITÀ DI VENDITA
VAC005005	VACUTEX™ medicazione per ferite 5 x 5 cm (2 x 2 inch)	1 scatola, 10 medicazioni
VAC010010	VACUTEX™ medicazione per ferite 10 x 10 cm (4 x 4 inch)	1 scatola, 10 medicazioni
VAC010015	VACUTEX™ medicazione per ferite 10 x 15 cm (4 x 6 inch)	1 scatola, 10 medicazioni
VAC010020	VACUTEX™ medicazione per ferite 10 x 20 cm (4 x 8 inch)	1 scatola, 10 medicazioni
VAC001040	VACUTEX™ drenaggio per ferite 1 x 40 cm (0,4 x 16 inch)	1 scatola, 10 drenaggi
VAC010100	VACUTEX™ rotolo per ferite 10 x 100 cm (4 x 40 inch)	1 scatola, 5 rotoli

